


## 自動現像装置 3形

Automatic Film Processor

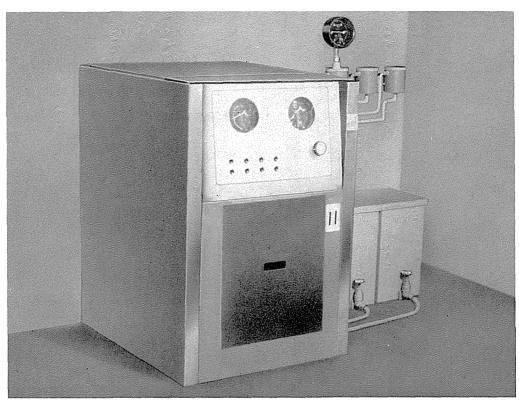

第 1 図 全 景

## 用 途

この装置は、X線フィルムの現像から乾燥までの処理 自動的に短時間に行なうものであります。

## 特 長

- 1 ローラでフィルムを移送していますので、フィルムハンガが必要でありません。したがって ハンガにフィルムをセットする時間がはぶけるとともに、フィルムに傷をつけることがありません。
- 2 停電になっても、手動ハンドルをまわして装置内に あるフィルムを処理することができますので、処理 フィルムをむだにすることがありません。
- 3 水洗そうは2個にわかれていますので、1度水洗されたフィルムは、再度まったく新しい水で水洗されますから、完全な水洗が行なわれます。
- 4 水洗そうへの給水は、押しボタン操作により自動的 に行なわれますから、使用するたびに水道のコック をまわす必要がありません。
- 5 現像液・定着液はもとより、水洗水もフィルタでろ 過していますので、常に清浄な液が供給されます。
- 6 溶液の補給は、フィルム1枚でとにその大きさに応

- じた適量を自動的に補給し, その量は流量計で直読 できるようになっております。
- 7 現像液の温度は、自動温度調節機構を備えています ので、あらかじめ設定された温度にたいして、たえ ず加熱または冷却を行ない、温度を一定に保ちます。 また その温度は温度計で直読できます。
- 8 定着液温と水洗水温は、それぞれ自動的にほぼ同温 に調節されます。
- 9 フィルムの乾燥は、吹きつけ管から清浄加熱空気を吹きつけて行なっており、その温度はロータリスイッチによって調節することができますから、湿度の高いときでもフィルムは完全に乾燥します。また温度計を備えていますので、乾燥温度が直読できます。
- 10 据えつけ面積が 小さくできておりますので、場所をとりません。また、どちらか一方の側面を壁に近ずけて据えつけることもできます。
- 11 カバー類は 簡単にとりはずすことができますから 保守・点検が容易に行なえます。
- 12 フィルムの送り込み口は、暗室でも簡単にフィルムが送り込めるようになっています。また、二重に送